

TASK

SINCE 1968

歯科医院用 タンパク分解・洗浄剤（防錆）

◆インスツルメント
◆ユニット周り
◆義歯・リテーナー
◆バキューム...etc
院内すべて対応!

1ℓあたり
¥29
低コスト

酵素と
オキシドール成分
Wパワー!



安くて頼れるマルチ洗浄剤

タスククリーン TASK CLEAN

～優れたタンパク分解と洗浄力～


『オキシドール成分』と『酵素』の力で、血液などのタンパク質を強力に分解します。


アルコール、漂白剤、蛍光増白剤、防腐剤を含有しないので、器材や環境に優しく、材質を選びません。

界面活性剤の含有率を約8%に抑えていますので、弱アルカリ性で泡切れも良く、水洗作業が簡単です。

マイクロパウダー状で素早く溶けるため、作業効率もバッチリ！

低価格

 400倍希釈 → 1ℓあたり **29**円 ※1製品あたり約200ℓ作れます

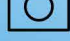 200倍希釈 → 1ℓあたり **58**円 ※1製品あたり約100ℓ作れます

標準価格：¥5,800

CODE：19200

内容量：500g

5g計量スプーン付

※器具・器材の汚れ具合によって洗浄方法を選択してください。
使用後は直ちに洗浄することをおすすめいたします。

使用済み器具類

すぐに洗浄できる場合

すぐに洗浄できない場合

超音波洗浄

浸漬 10分~

水2ℓに付属スプーン1杯

400倍希釈

浸漬洗浄

浸漬 10分~

水1ℓに付属スプーン1杯

200倍希釈

※洗浄液は、一日一回の頻度で交換してください。

※汚れ具合によって、洗浄時間を調整してください。

スプレーする

500ml ボトルに
付属スプーン1杯

血液などタンパク質汚れの
乾燥・凝固を防ぎます

**流水すすぎ
水分除去**

※十分なすすぎと水分除去を行ってください。
洗浄後に水分が残置したまま放置をすると
錆等の原因となります。

滅菌・消毒

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など

乾燥・保管

その他

希釈液に浸す

スピットン・バキューム

バキューム・スピットンに希釈液約300ccを吸引させ、
一晩放置する。その後十分に水を吸引させて洗い流す。

白衣・院内着


血液などが付着した部分に希釈液を塗布し、水洗後に洗濯する。

義歯・リテーナー

希釈液に浸して、必要に応じて超音波洗浄を行う。

～汚染血液による除タンパク効果試験結果～

(公的第三者機関による)

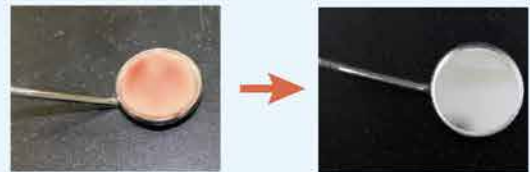

浸漬洗浄 10分 (200倍希釈液) …… **98.3%除去**
超音波洗浄 10分 (400倍希釈液) …… **99.1%除去**

※ミラートップは超音波洗浄を行わないでください

～24時間浸漬 腐食試験結果～

(公的第三者機関による)



スチールバー、ミラー、ステンレス
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック

**24時間浸漬で
変化なし**

