

弱酸性次亜塩素酸クリーナー ナノクイック



弱酸性次亜塩素酸 + ナノ洗浄のダブルパワー！
細菌やウイルスを素早く除去！

約8300万個の芽胞に対して、**10秒で99.99%**の除去率！
(公的第三者検査機関調べ)



ティッシュ等にナノクイックを含ませ、
レンズ表面を含む本体をまるごと除菌できます！
またルーペのゴーグル部分や眼鏡には直接スプレーし、
拭き取り もしくは 水洗を行ってください。

浸漬洗浄ができないルーペや
マイクロのレンズを痛めることなく、
簡単に除菌や洗浄ができないかな？

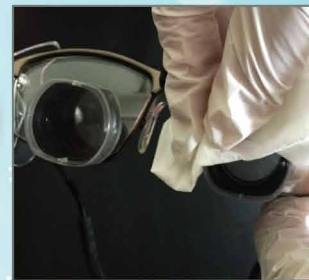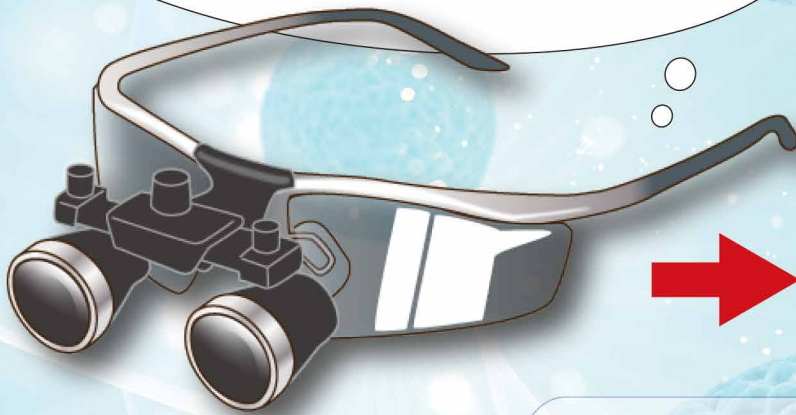

OTHER LINEUP



◆400cc (スプレータイプ)
商品コード：19301
標準価格：3,000円



◆50cc (携帯用)
商品コード：19300
標準価格：1,500円



◆1L (詰め替え用)
商品コード：19302
標準価格：5,000円



◆4L (詰め替え用)
商品コード：19303
標準価格：18,000円



◆5L (詰め替え用)
商品コード：19304
標準価格：23,000円

今まで除菌・洗浄が難しかった様々なアイテムにお使いいただけます！



デンチャー・印象物・マウスガード

気泡の防止
感染防止
濡れの改善



白衣・院内着

脱色せずに
血液などを
洗浄します



訪問診療時のインスツルメント・開口器など

往診先での
診療器具の
除菌・洗浄に



無影灯カバー・スピットン・ユニット周辺

臭いが気になりやすい
スピットン部の消臭や
无影灯のプラスチック
カバーなどの除菌に



タービン・ハンドピース

こまめな洗浄が困難な
タービンやハンドピース、
ワークテーブルを素早く
除菌します



商品の詳しい使用方法を示した「Q&A資料」がございます。是非、ご請求ください！

主成分：
次亜塩素酸 約 0.02%
非イオン界面活性剤 0.05% 以下
(※原液でご使用ください)

- ◆**双眼ルーペ**
流水・浸漬洗浄不可のルーペは、本剤を一度ティッシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。
※ゴーグル部や眼鏡などには直接スプレーが可能です。但しスプレー後は水洗またはティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- ◆**印象物**
口腔内から採取した印象物を水洗後、本剤でまんべんなくスプレー噴射し、約1分放置後、軽く水洗し、石膏を注入する。
※印象材により石膏注入の時間などが異なる場合がありますので、必ず各メーカーの指示に従ってください。
※本剤は口腔内では使用できません。
- ◆**訪問診療用の器具**
本剤を直接スプレーしティッシュペーパー等で拭き取るか、本剤をティッシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。
- ◆**血液が付着した白衣など** ◆**マウスガード・リテーナー** ◆**スピットン** ◆**ユニット** ◆**シンクなど** ◆**ワックスパターンのクリーナーとして**

<ご注文・価格のお問合せは>

<販売元>

歯科用インスツルメント
株式会社 **タスク**

〒112-0001
東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837